

# VetoSlide

**Diagnostyka bakterii Gram+ i Gram – powodujących kliniczne zapalenie wymienia u krów**

**Zawartość:** 12 testów VetoSlide /12 wacików

**Przechowywanie:** Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze nie przekraczającej 25° C. Trzymać poza zasięgiem dzieci. **Nie przechowywać w lodówce.**

**Sposób użycia :**

1. Pobierz i opisz sterylną próbkę mleka z ćwiartki wymienia.
2. Użyj świeżej próbki w czasie do 2 h, jeśli nie-przechowuj próbkę w lodówce w temperaturze do 7° C, maksymalnie 24 godziny.
3. Przygotuj test VetoSlide w czystym miejscu i użyj sterylnego wacika do naniesienia próbki mleka (1 test i 1 wacik na próbkę) .
4. Rozmaż w górę i w dół próbkę mleka zygzakowatym ruchem na każdej stronie.
5. Oznakuj test VetoSlide i umieść go w ciepłarni pokrywką do góry (35-37 °C).
6. Pozostaw w inkubacji przez 24 godziny.
7. Identyfikacja obecności bakterii (patrz grafika do interpretacji).
8. Zanurz test w wybielaczu przed wyrzuceniem go do odpowiedniego pojemnika.